

SV

Avsedd användning

Et oöjsoverlägg för användning under ICSI eller gamet- och embryoodling, i eller utanför inkubator.

Komponenter

Lätt paraffinolja

Prestandaegenskaper

Steri filterad SAL 10 ³	
Densitet	0,82-0,88 g/ml
Endotoxinnivå	<0,1 EU/ml
Peroxidnivå	<0,02 mEq/kg
Overlevnad hos mänsklig sperma efter 18 timmar	>95 %
M.E.A (% blastocyst efter 5 dagar)	>80 %

Förvaring och hållbarhet

Förvara vid 2 till 27 °C och undvik temperaturer över och under dessa värden. Under dessa förhållanden har NiOil en hållbarhet på 24 månader. Utgångsdatumet visas på både flaskor och kartonger.

Öppna och stäng flaskor under aseptiska förhållanden. Förvara vid 2 till 8 °C efter öppning, när den inte används. Hållbarheten på produktetiketten avser när produkten förvaras och hanteras enligt tillverkarens rekommendationer. Inga antibiotika, instabila tillsatser eller konserveringsmedel har tillsatts NiOil av tillverkaren.

Försiktighetsåtgärder och varningar

- Använd aseptisk teknik vid alla tillfällen
- Se till att media täcks helt
- Rengör oavsäktligt spill med lämpligt vätskeabsorberande material. NiOil gör golv och arbetsbänkar extremt hala
- NiOil är brännbart och ska inte användas i närheten av öppen låga. Ett säkerhetsdatablad är tillgängligt från distributören eller tillverkaren (se www.nidacon.com)
- Använd inte lösning som visar tecken på bakteriell kontamination eller om skruvlocket av misstag kommer i kontakt med icke-sterila ytor.
- Använd inte innehållet om garantiförelöspingen är bruten
- Får ej återanvändas. Återanvändning kan leda till biologisk kontaminering och/eller förändring av produktens egenskaper.
- Enligt federal lag (USA) får denna anordning endast säljas av eller på order av en läkare
- Kontrollera regellefterlevnaden som reglerar användningen av ART-produkter i ditt land

Bruksanvisning

Inkubera vid 37 °C i 5-6 % CO2 över natten före användning.

Symbol

1. Temperaturgräns	5. Se bruksanvisningen
2. Basföre - se etikett	6. CE-märkning
3. Steriliserad med aseptisk teknik	7. Tillverkare
4. Satskod	8. Avsedd användning

Ordering Information

Volume	Article No.
100mL	NO-100
4 x 100mL	NO-400K

Manufactured by:

 Nidacon International AB
Fljögelbergsgatan 16B
431 37 Mölndal, Sweden
E-mail contact@www.nidacon.com
Tel: +46-31-703 06 30
www.nidacon.com



2460